

# BlueShaper<sup>®</sup>

ZARC

	MFD	TAPER	Ø
Z1	0,90	2-10%	0,14
Z2	0,90	2-10%	0,17
Z3	0,88	5-6%	0,19
Z4	0,91	5-6%	0,25

# BlueShaper<sup>®</sup>



**KFile**  
#10



Glide Path



**Z1** **Z2**

RPM: 500  
Torque: 4



Shaping



**Z3** **Z4**

RPM: 500  
Torque: 4



Finishing



*Irrigate, recapitulate with a 10 file and re-irrigate after removing each rotary file*