

# Puntas de gutapercha para conductos

## INSTRUCCIONES DE USO

La gutapercha es uno de los materiales de restauración dental. Los dentistas lo usan como relleno de conductos cuando están tratando enfermedades endodónticas. Nuestra gutapercha obtuvo el premio de ShangHai New Excellence Product.

1. Es espícula blanca (o rosa), sin olor, sin irritación con la desinfección.
2. Es impermeable a los rayos X, observamos claramente el relleno del conducto.
3. Tiene cierta firmeza. Puede entrar fácilmente en el conducto fino y obstruido.
4. Su diámetro y tamaño están de acuerdo con el ensanchador del conducto.

## COMPOSICIÓN

Gutapercha natural de alta calidad, óxido de zinc.

## 1) INDICACIONES DE USO

Se usa en el conducto para obturar cuando los dentistas realizan endodoncias.

## 2) CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

## 3) ADVERTENCIAS

- Debe desinfectarse con alcohol antes de usarlo.
- No debe aplicarse a pacientes alérgicos.

## 4) ESPECIFICACIONES

- Se produce de acuerdo con ISO 6877. Se puede personalizar el tamaño de acuerdo con los requisitos de los conductos con variedades de tipos.

Tamaño de Gutapercha 0.04 y 0.06				
Especificación estándar	.04/25	.04/30	.06/25	.06/30
Longitud (mm)	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.25	0.30	0.25	0.30

Tamaño de Gutapercha especial		
Denominación	X-Fine	Fine
Longitud (mm)	28	28
Diámetro punta (mm)	0.14	0.17

Tamaño de Gutapercha BlueShaper®					
Denominación	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
Longitud (mm)	28	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50

Tamaño de Gutapercha Excalibur®				
Denominación	E20	E25	E35	E45
Longitud (mm)	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.20	0.25	0.30	0.40

Tamaño de Gutapercha SlimShaper®		
Denominación	ZS2	ZS3
Longitud (mm)	28	28
Diámetro punta (mm)	0.20	0.25

## 5) ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- Almacénese en un lugar fresco. Manténgase alejado de la luz solar directa, gases irritantes y humo.
- Almacénese según los requisitos.
- Tres años de vida útil.

## 6) EMBALAJE

- Paquete de caja: 100 piezas/caja o 60 piezas/caja según tamaño de gutapercha. La etiqueta y firma con prueba de conformidad en la caja.


 ShangHai XingYu Medical Equipment CO., Ltd  
 2nd Floor, No. 68, Yongqiang Road, Sijing,  
 Shanghai, China, 200436  
 hola@zarc4endo.com • www.zarc4endo.com


 DENTASIA (EUROPE) LIMITED  
 Suite B, 29 Harley Street,  
 London, United Kingdom  
 W1G9QR, UK


 Importador para la UE:  
 IPG Dental Group S.L.  
 C. del Concejo de Tapia de Casariego, 1,  
 Local, 33204 Gijón, Asturias (Spain)